

Корсет полужесткой фиксации текстильный КРО-79

Корсет выполнен из текстильного полотна. Состоит из пояса, 6 пластиковых шин-вставок, дополнительной двойной стяжки. Дополнительные двойные ленты усиления из бандажной резины, растяжимой только в продольном направлении, способствуют равномерному облеганию тела и позволяют самостоятельно регулировать силу натяжения корсета. Пояс крепится на застежке-липучке типа «Велкро».

Назначение:

- умеренная фиксация пояснично-крестцового отдела позвоночника в физиологически выгодном положении
- уменьшение нагрузки на межпозвонковые диски и позвонки
- разгрузка мышечно-связочного аппарата

Показания к применению:

- боли в спине любой этиологии;
- воздействие на поясничный отдел значительных динамических и статических нагрузок, особенно при работе в неблагоприятных климатических условиях;
- нестабильность позвонков поясничного отдела;
- остеохондроз и др. дегенеративные изменения поясничного отдела позвоночника;
- период реабилитации после травм и операций в области поясничного отдела позвоночника, радикулит, спондилолистез.

Противопоказания:

Локальные дерматиты. При наличии вентральных и диафрагмальных грыж обязательно необходима консультация лечащего врача.

Применение:

Изделие применяют по рекомендации врача. Корсет надевают на хлопчатобумажное белье, в положении лежа. Ребра жесткости должны располагаться вдоль позвоночного столба. Дополнительными лентами усиления регулируют требуемое натяжение.

Таблица размеров

Размер корсета	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Обхват талии, см	65-75	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135

В случае несоответствия представленному размерному ряду, возможно индивидуальное изготовление на заказ.

Как снять мерки

Измерить окружность талии в сантиметрах – мерная лента располагается горизонтально на уровне пупка.