

medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре

Инструкция по применению
ортопедических изделий

**ЭЛАСТИЧНЫЕ БАНДАЖИ
НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ**

MKN-103(M)

SKN-103(M)



WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Эластичный бандаж Orlett на коленный сустав, арт. MKN-103(M), выполнен из современного материала, заменителя хлопка, состоящего из особых полиэфирных волокон с четырехлепестковым поперечным сечением, которые обеспечивают активную транспортировку влаги с поверхности кожи на внешнюю поверхность бандажа.

Эластичный бандаж Orlett на коленный сустав, арт. SKN-103(M), выполнен из современного материала, технологичного заменителя шерсти, при создании которого керамический порошок добавляют в структуру полимерной нити, переплетенной в строго определенном порядке по специальной технологии.

Бандаж Orlett, арт. MKN-103(M), с металлическими спиральными ребрами жёсткости обеспечивает среднюю степень фиксации коленного сустава и компрессионный эффект, способствует уменьшению отека и улучшению кровоснабжения мягких тканей, прилегающих к суставу.

Бандаж Orlett, арт. SKN-103(M), с металлическими спиральными ребрами жёсткости обеспечивает среднюю степень фиксации, согревание и компрессию коленного сустава; ребра жесткости уменьшают ударные нагрузки на сустав при ходьбе.

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- травмы, ушибы, растяжения связок суставов;
- профилактика развития и обострений воспалительных заболеваний суставов (артритов, тендинитов, тендовагинитов);
- болевой синдром при хронических дегенеративных заболеваниях суставов (артрозах и остеоартрозах);
- профилактика травм при занятиях спортом, производственных нагрузках на сустав.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Для профилактики травм и обострений заболеваний сустава, а также в период реабилитации после травм.

Рекомендованный режим: при нагрузках на сустав (производственных или спортивных).

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения бандажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людям, имеющим заболевания кожи, перед использованием бандажа необходимо проконсультироваться у врача.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж Orlett, арт. MKN-103(M), выполнен из современного материала, который способствует интенсивному испарению влаги с поверхности кожи, имеет высокую проницаемость для воздуха, обладает всеми достоинствами изделий из натурального хлопка, но более прочный, износостойкий и гигиеничный, чем чистый хлопок, не вызывает аллергии и раздражения кожи.

Бандаж Orlett, арт. SKN-103(M), выполнен из современного материала, который сохраняет тепло и улучшает кровообращение в области сустава, усиливает лечебный эффект наружных лекарственных средств (мази, гели, кремы); обладает всеми достоинствами изделий из натуральной шерсти, но более прочный, износостойкий и гигиеничный. Не вызывает аллергии и раздражения кожи.




На рисунке отмечены следующие элементы конструкции:

1. Эластичный бандаж.
2. Металлические пружинные ребра жесткости.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Бандаж натягивается на колено так, чтобы вставка специальной вязки располагалась в области коленного сустава, при этом название марки Orlett должно расположиться спереди, сверху.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

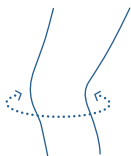

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность середины коленного сустава.

Согласно полученным результатам подобрать необходимую модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	S	M	L	XL	XXL
Окружность середины коленного сустава, см	30-35	35-40	40-45	45-50	более 50

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Для поддержания функциональных свойств полотна необходимо регулярный уход за изделием. Рекомендуется стирать Ваше изде-

лие после 3-5 применений. Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой!

После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

Бандаж Orlett, арт. MKN-103(M): 23% полиэстер, 21% хлопок, 17% латекс, 11% эластан, 28% сталь.

Бандаж Orlett, арт. SKN-103(M): 29% хлопок, 19% полиамид, 7% эластан, 28% сталь, 17% латекс.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бандаж Orlett MKN-103(M): ортопедическое изделие арт. MKN-103(M), инструкция по применению.

Бандаж Orlett SKN-103(M): ортопедическое изделие арт. SKN-103(M), инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____

Изделия протезно-ортопедические: бандажи на нижние конечности: бандажи на коленный сустав: арт. MKN-103(M), арт. SKN-103(M).

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09550 от 17.12.2021 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Производитель: Рехард Технолджис ГмбХ, Германия, Rehard Technologies GmbH, 10785 Berlin, Potsdamer Str. 92, Germany.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «НИКАМЕД», Россия, 127015, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД», тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

